



長下肢装具の 多面的利用ができます

歩行訓練でKAFOを使用


大腿部の取り付け

ワンタッチで可能

大腿部の取り外し

日常生活場面 (ADL) でAFOを使用

トイレ動作時、車いす移動・移乗時に
良い姿勢でのリハビリテーションができます

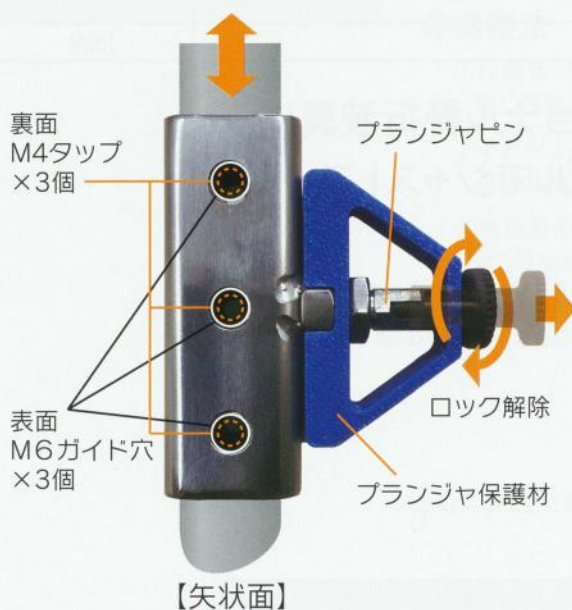

●使用方法

●大腿部の取り外し

内外側のプランジャを引いてロックを解除後、大腿部を上方へ引き上げて外します。

●大腿部の取り付け

内外側のプランジャを回して解除し、大腿部内外支柱を上方より挿入し、自動ロックします。



【水平面】

※開発協力 医療法人 福岡桜十字 桜十字福岡病院

品番	適応筋金	寸法 (W×D×H)	重量
A-1255-1	4×16mm	50×9×56mm	50g
A-1255-2	5×14mm	48×9×56mm	
A-1255-3	5×16mm	50×10×56mm	

アドバンフィット株式会社

〒866-0815 熊本県八代市長田町3300番地
TEL (0965) 33-3992
FAX (0965) 32-1492